


...information technique

Poids maximum 140kg

L'élévateur est testé suivant les derniers critères CE.

Si votre salle de bain est plus grande, ou plus étroite que les dimensions spécifiées, nous sommes en mesure de construire un système spécial pour vous. Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations.

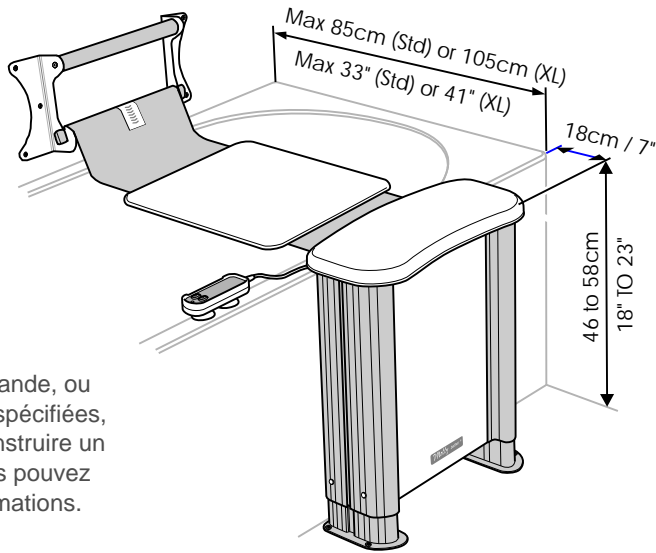

Molly bather™

Molly

ceinture-siège mural

siège gonflable

siège portable

bain complet	✓	✓	✓	✗
siège de séchage	✓	✗	✗	✗
accessibilité de poignée	✓	✗	✗	✗
coussin-glissant	✓	✗	N/A	N/A
assez de place pour les jambes	✓	✓	✓	✗
l'utilisateur peut s'incliner complètement	✓	✓	✓	✗
facile à enlever pour les cohabitants	✓	✓	✗	✗
fonctionne sur batterie	✓	souvent secteur ⚠	souvent secteur ⚠	✓
nombre d'utilisations par charge de batterie	20+	N/A	N/A	5-10



Votre revendeur local

MOLLY BATHER LTD

49A Littlemarsh, Semington
Trowbridge, Wilts. UK
Tel: 0044 1380 870649
Fax: 0044 1380 871056
E-mail: sales@mollybather.com
Web: www.mollybather.com

Ce produit est protégé par un brevet : GB 2366722

En accord avec notre politique de l'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de l'équipement sur cette notice.

www.mollybather.com

Molly bather - une affaire de famille

Molly Bather Ltd. est une petite entreprise familiale dans l'ouest de l'Angleterre. Le Molly Bather élévateur de bain a été conçu en l'an 2000 grâce aux connaissances et à l'expérience acquises depuis plus de 25 ans, dans le développement des produits de soins de santé au niveau mondial. L'élévateur de bain est fabriqué au Royaume-Uni conformément à des réglementations très exigeantes.

Molly Bather est l'un des élévateurs les plus adaptés à vos besoins, de toute l'Europe. L'élévateur de bain vous permet d'utiliser toute la longueur, la largeur et la profondeur de la baignoire existante. L'élévateur de bain est fabriqué en aluminium et en acier inoxydable, ce qui le rend très résistant.

Trouvez ci-dessous quelques-unes des ses caractéristiques



- 1) La bande peut être retirée par une poignée de sorte que d'autres puissent profiter d'un bain normal.
- 2) Vous trouvez en page suivante les détails sur le poignée-rail et autres accessoires.
- 3) Un tabouret rembourré assure une entrée et sortie du bain facile et en toute sécurité.
- 4) Avec un bouton, on peut activer montée et descente à l'intérieur et hors du bain.
- 5) L'élévateur de bain est entraîné par une batterie rechargeable (sous le siège).

... l'élévateur de bain en marche

1) Asseyez-vous sur le tabouret rembourré pour retirer vos vêtements en sécurité.



2) Tournez de côté, parallèle à la baignoire et soulevez vos jambes pour entrer dans le bain.



3) Asseyez-vous sur le coussin-glissant pour entrer plus profondément dans votre baignoire.



4) Relaxez-vous dans votre bain sans aucun encombrement.



5) Vous pouvez vous surélever, avec le siège-glissant, pour vous préparer à sortir du bain.



6) Glissez-vous sur le tabouret, vos jambes sont encore dans la baignoire.




7) Passez vos jambes au dessus de la baignoire en vous servant de la poignée comme appui.




8) Vous pouvez maintenant vous tourner à votre guise pour vous sécher et vous habiller.



Le coussin-glissant, unique en son genre, a été conçu par des experts permettant à l'utilisateur de rester au milieu de la ceinture sans se heurter d'un côté et de l'autre. Ce coussin-glissant est fabriqué en mousse spéciale qui empêche tout liquide de s'imprégner. Il est aussi lavable en machine.

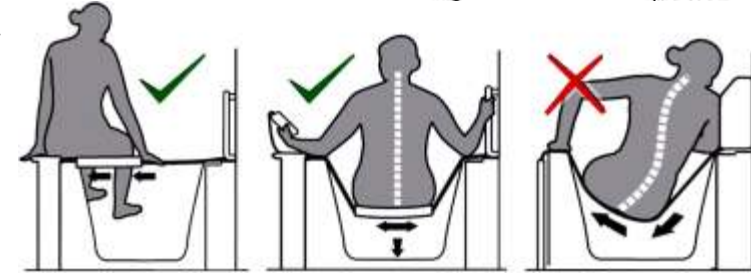

...Possibilités d'utilisation pour la poignée-rail.

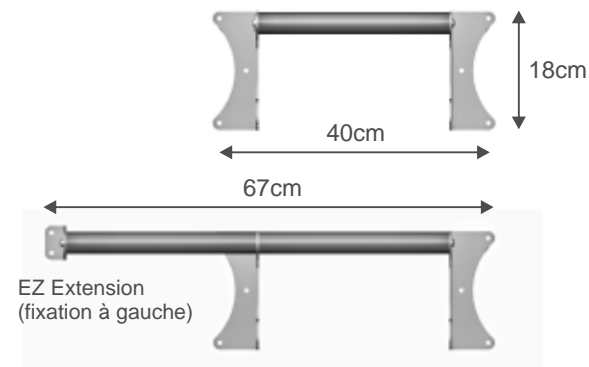

La poignée-rail EZ vous offre tout confort et sécurité lorsque vous utilisez votre Molly Bather.

La poignée-rail est soigneusement vissée au mur en face du tabouret Molly Bather, offrant ainsi un soutien supplémentaire pour entrer et sortir de votre bain sans aucune inquiétude.

Le rail EZ peut s'allonger pour donner plus grand support à ceux qui souffrent d'arthrose et peut être placé à droite ou à gauche (voir schéma).

La poignée-rail est assez étroite pour être installée même sous votre fenêtre, en cas de nécessité.