


...technische Informationen

Der Lift ist bis zu 140kg belastbar.

Der Lift ist nach den neuesten CE-Kriterien getestet.

Sollte Ihre Badewanne länger, kürzer, breiter oder schmaler als die angegebenen Maße sein, können wir Ihnen einen maßgefertigten Molly Bather anbieten, der zu so gut wie jeder Badewanne passt. (Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen)

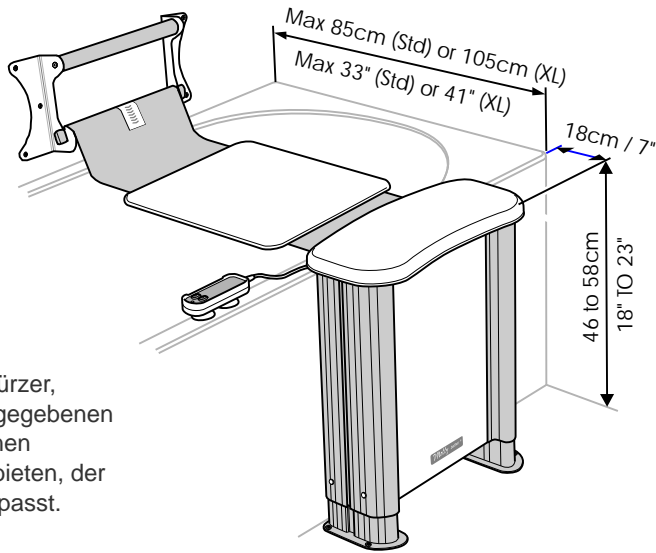

Molly bather™

Molly

	Wandmontierter Gurtlift	Aufblasbarer Lift	Tragbarer Badelift
Vollbad	✓	✓	✗
Polstersitz	✗	✗	✗
Erreichbarkeit des Haltegriffs	✗	✗	✗
Gleitkissen	✗	N/A	N/A
volle Beinfreiheit	✓	✓	✗
Benutzer kann sich ganz zurücklehnen	✓	✓	✗
für andere einfach zu entfernen	✓	✗	✗
batteriebetrieben	Offt am Netz ⚠	Offt am Netz ⚠	✓
Bäder pro Ladevorgang	20+	N/A	5-10



Ihr Händler :

MOLLY BATHER LTD

49A Littlemarsh, Semington
Trowbridge, Wilts. UK
Tel: 0044 1380 870649
Fax: 0044 1380 871056
E-mail: sales@mollybather.com
Web: www.mollybather.com

Produktschutz unter Patent : GB 2366722
Da es unser Motto ist, unsere Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht vor, Einzelheiten der hier gezeigten Produkte zu verändern.

www.mollybather.com

Molly bather - ein Familienunternehmen

Molly Bather Ltd. ist ein kleines Familienunternehmen, im Westen von England. Der Molly Bather Badlift wurde im Jahr 2000 mit dem Wissen und der Erfahrung aus über 25 Jahren in der Entwicklung von Weltklasse-Gesundheitspflege-Produkten entwickelt. Der Badlift wird in Großbritannien zu außergewöhnlich hohen Standards hergestellt.

Molly Bather ist einer der vielseitigsten Badlifte, der in Europa erhältlich ist. Der Badlift ermöglicht Ihnen, die gesamte Länge, Breite und Tiefe der vorhandenen Badewanne zu verwenden. Der Badlift ist aus Aluminium und Edelstahl hergestellt und ist somit sehr langlebig.

Unten sind einige der einzigartigen Eigenschaften angegeben.



- 1) Das Band kann aus dem Haltegriff genommen werden, damit andere ein normales Bad genießen können.
- 2) Den EZ Haltegriff und Zubehör sehen Sie auf der folgenden Seite.
- 3) Der Einstieg in und aus der Badewanne ist sicher und einfach mit dem gepolsterten Sitz.
- 4) Heben und senken Sie sich mit einem Knopfdruck in und aus dem Bad.
- 5) Der Badlift wird von einem aufladbaren Akku (unter dem Sitz) angetrieben.

... die Badlift in Aktion

1) ziehen Sie sich auf dem gepolsterten Sitz sicher aus.



2) bewegen Sie sich parallel zur Badewanne und schwingen Sie Ihre Beine in die Wanne.



3) Rutschen Sie auf das Sitzkissen und lassen sich in die Wanne herunterfahren.



4) Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie ein entspanntes Bad.



5) Lassen Sie sich wieder nach oben fahren, um auszusteigen.



6) Rutschen Sie auf das Sitzkissen, mit Ihren Beinen noch in der Wanne.



7) Heben Sie Ihre Beine über den Badewannenrand und halten Sie sich dabei am Haltegriff fest.




8) Drehen Sie sich etwas, um sich auf dem Sitz zu trocknen und anzuziehen.



Das einzigartige Gleitkissen wurde von Bade-Experten entwickelt, es erlaubt dem Benutzer zentral auf dem Band zu bleiben (im Gegensatz zu anderen Badliften). Das gepolsterte Gleitkissen ist aus einem speziellen wasserabweisenden Schaumkissen hergestellt, und ist Waschmaschinenfest.



...Haltegriff Optionen

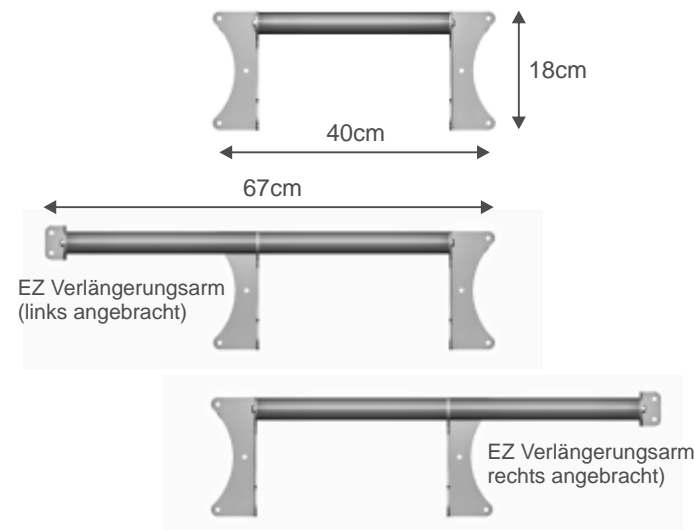

Die EZ Haltegriff sorgt für optimale Sicherheit und Komfort bei der Nutzung Ihres Molly Bather.

Der EZ Haltegriff wird fest an der Wand gegenüber dem Molly Bather geschraubt und bietet zusätzliche Unterstützung beim Ein- und Aussteigen aus der Wanne.

Der EZ-Verlängerungsarm bietet zusätzliche Unterstützung für Arthritiker und eignet sich sowohl für Rechts- und Linkshänder, (siehe Abbildung).

Die EZ Haltegriff ist schmal genug, um, wenn nötig, unter den meisten Fenstern angebracht zu werden.